

## Hygiene, Pflege und Reinigungshinweis

Den Akupressur-Therapiekegel Esche mit einem nebelfeuchten Tuch abwischen (Privatgebrauch). Alternativ kann auch Desinfektions- oder Spülmittel benutzt werden (bei gewerblicher Nutzung). Bei Letzterem besteht die Möglichkeit, dass das Holz schneller nachdunkelt. Damit der

Akupressur-Therapiekegel Esche lange seinen Glanz behält, können Ball und Fassung mit wenigen Tropfen Leinöl eingerieben werden.

Holz ist ein Naturprodukt, somit ist jedes Stück ein Unikat! Abbildungen können von Farbe und Maserung abweichen.

Biber  
Umweltprodukte Versand GmbH  
6850 Dornbirn | Austria  
[www.biber.com](http://www.biber.com)

**biber**

# Akupressur- Therapiekegel Esche



## **Was ein Ball kann, kann der Akupressur-Therapiekegel Esche noch besser!**

Einmal Kontakt auf der Haut, gleitet die Kugel in ihrer Fassung und bringt Ihnen einen punktuellen und wohltuenden Massage-Effekt. Kein Abmühen auf dem Boden oder an der Wand. Der Akupressur-Therapiekegel Esche ist so konzipiert, dass in beinahe jeder Lage ein müheloses Abrollen des ganzen Körpers möglich ist (bis auf die Brustwirbelsäule).

Von **Aua** bis **Zart** – auf den Therapiekegel kann mit dem

Handballen so viel Druck aufgebaut werden wie gewünscht. So können zum einen mit weichem Druck die Rezeptoren der Haut auf angenehme Weise aktiviert werden. Zum anderen können mit viel Druck Verspannungen und Trigger-Punkte gelöst werden. An Stellen wie z.B. den Fußsohlen kann der Ball selbstverständlich auch ohne seine Fassung benutzt werden.

### **Produkt-Qualität und Merkmale**

Der Akupressur-Therapiekegel Esche ist zu 100 % handgefertigt. Die Esche wird nach

alter Tradition in Verbindung mit ein bisschen Hightech gedrechselt. Die präzise Handwerkskunst garantiert, dass der Ball einwandfrei in seiner Fassung rollt und der Anwender schnell seiner Entspannung näherkommt.

### **Beachte**

1. Vor dem Auftragen des Balles auf der Haut die Kugel mit einem Finger fixieren – beim ersten Hautkontakt bleibt der Ball in der Fassung.
2. Bitte vor der Benutzung Kleidung ablegen, um ein ideales Rollverhalten zu gewährleisten. Sprich: Auf nackter Haut rollt er am

besten.

3. Die Benutzung erfolgt stets auf eigene Gefahr! Kleinbälle von Kindern fernhalten, Verschluckungsgefahr.

### **Oberfläche**

Zweifach handgeölt mit „BIOFA Bio Öl“ (auf Lebensmittelverträglichkeit erfolgreich geprüft).

Hinweis: Der Akupressur-Therapiekegel Esche kann nach dem Kauf bis zur völligen Trocknung (2 Wochen) noch etwas nach Bio-Leinöl riechen (bitte nicht in Schlafräumen aufbewahren).